

Instructie afname via het ademafname systeem

1



Haal het ademafname systeem uit de verpakking door het plastic te verwijderen.

2




Verwijder beide uiteinden van het ademafname systeem. Neem een ballon.

3



Plaats een ballon op het smalle uiteinde. Gebruik de brede kant voor blazen

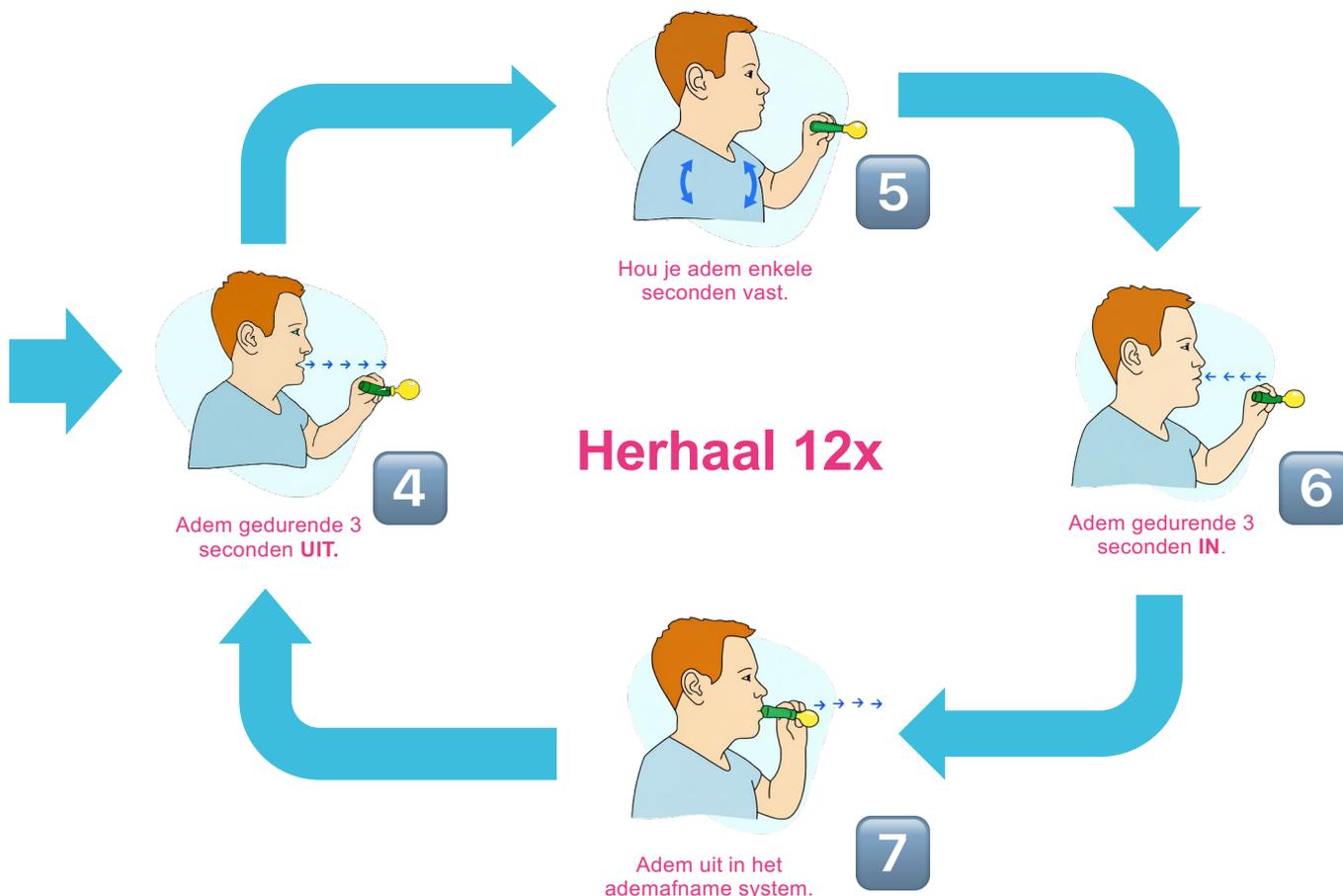

Etiketteren van het ademafname systeem

Plak het bijgeleverde etiket op het ademafnamesysteem. Verwijder het onderste deel van het opgeplakte etiket op het ademafnamesysteem en plak deze op het aanvraagformulier. Verpak het ademafname systeem in het meegeleverde biosafety zakje. Verzend het ademafname systeem met de bijgeleverde envelop. Gooi de ballon en de plastic verpakking bij het gewone afval weg.

